

Brugsanvisning

Wellness Nordic Gyngestolen®

Model No. PA-MR30



INDHOLDSFORTEGNELSE**FØR BRUG**

MONTERINGSANVISNING	DA0
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FØR BRUG	DA2
VEJLEDNING OM JORDFORBINDELSE	DA4
SPECIFIKATIONER	DA5
PRODUKTINTRODUKTION	DA6
Funktioner	DA6
Præsentation af programmerne	DA6
DELENES BETEGNELSER OG FUNKTIONER	DA7
Hovedenhed	DA7
Fjernbetjening	DA8
OPSTILLING AF GYNGESTOLEN	DA9
Anvendelsesområde for gyngestolen	DA9
Sådan opstilles gyngestolen	DA9

ANVISNINGER FOR BRUG

FORBEREDELSE	DA11
Fjernbetjening	DA11
OBS vedrørende batterier	DA11
Gyngestol (før hver anvendelse)	DA11
GRUNDLÆGGENDE DRIFT	DA13
Afbrydelse af et program	DA14
PROGRAMINDHOLD	DA15
Afslapningsprogram (Relax – ca. 20 minutter)	DA15
Opkvikningsprogram (Refresh – ca. 20 minutter)	DA15
Komfortprogram (Comfort – ca. 120 minutter)	DA16
SÅDAN JUSTERES INDHOLDET AF ET PROGRAM IHT. DINE ØNSKER	DA17
Sådan justeres vuggehastigheden	DA17
Sådan justeres tilbagelæningsvinklen for ryglænet	DA17
Sådan justeres lydstyrken for musikken	DA17
Sådan justeres vibrationernes intensitet	DA17
BETJENING AF GYNGESTOLEN UDEN BRUG AF FJERNBETJENINGEN	DA18
TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR FOR AT LYTTE TIL MUSIK	DA18
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	DA19
Områder af syntetisk læder	DA19
Plastområder	DA19
Sædestof	DA19
FEJLFINDING	DA20

MONTERINGSANVISNING

A. Samling af gyngestol og vogn



1. Løft fodstøtten til øverste position.



2. Placér vognen med låste hjul.



3. Vip gyngestolen op på baghjulene, og rul den frem mod vognen.



4. Tip gyngestolen ned i vognen. Vær sikker på, at gyngestolen går ned i vognen.



5. Skub gyngestolen helt frem i vognen, og sænk den ned.



6. Skru de 4 skruer på siden af vognen ind imod gyngestolens ramme.


B. Montering af el-ledning



1. Før ledningen frem mod stikket.



2. Sæt ledningen ind i stikket.

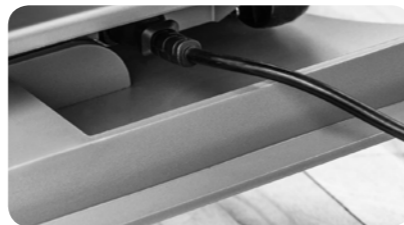


3. Ledningen er færdigmonteret.

C. Montering af armlænskontakten



1. Placér vognen med låste hjul.

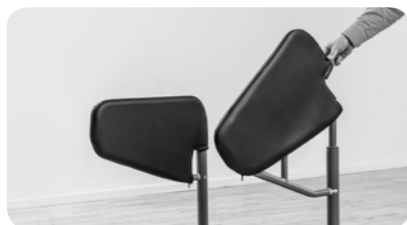

2. Placér armlænspolstringen over armlænet.



3. Lyn lynlåsen.

MONTERINGSANVISNING

D. Montering af inkontinensbetræk*



1. Placér inkontinensbetrækket over sæddet.



2. Løft madrassen.



3. Montér velcroen på bagsiden af madrassen.



4. Fold madrassen fremover, og monter inkontinensbetrækket.



5. Sæt inkontinensbetrækkets korte og lange slip sammen.

E. Montering af plastbeskyttelse på fodstøtten



1. Træk plastbeskyttelsen over madrassen på fodstøtten.

*Antibacterial Stamskin behandlet med Sanitized®PL 24-32. Kan vaskes ved 60°. Må ikke tørretumbles.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FØR BRUG**⚠ ADVARSEL****Følg disse forholdsregler**

1. Før gyngestolen anvendes i en klinisk sammenhæng, kræves en sundhedsmæssig vurdering af brugeren.
2. Hvis brugeren får det dårligt, mens vedkommende anvender gyngestolen, skal det ansvarlige personale straks stoppe brugen af gyngestolen og kontakte den person, der er ansvarlig for brugerens velbefindende. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller medicinske lidelser.
3. Når man læner ryglænet tilbage eller fodstøtten ned, skal man kontrollere, at der ikke er børn eller kæledyr i nærheden af gyngestolen. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskadekomst.
4. Sæt altid strømstikket helt ind i stikkontakten. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
5. Fjern støv fra strømstikket med jævne mellemrum. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre brand.

Sikkerhedsforhold

1. Det er ikke tilladt at stå på ryglænet eller fodstøtten.
2. Lad ikke børn anvende gyngestolen alene. Lad ikke børn lege på gyngestolen, ryglænet eller fodstøtten.
3. Gyngestolen bør kun under professionel supervision anvendes af personer, som ikke kan bevæge sig ved egen hjælp eller kommunikere. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskadekomst.
4. Undlad at overskride mærkeværdierne for stikket og ledningen eller at anvende en anden spænding end mærkespændingen. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, funktionsfejl eller brand som følge af varmegenerering.
5. Undgå at beskadige strømledningen eller strømstikket. (Undlad at gøre følgende med ledningen: beskadige den, ændre den, udsætte den for varmekilder, bøje den, sno den, trække hårdt i den, bundte den sammen eller placere tunge genstande oven på den.) Hvis du anvender en strømledning eller et strømstik, som er beskadiget, kan det medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand.
6. Undlad at tilslutte/afbryde strømstikket med våde hænder. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød.
7. Man bør ikke selv adskille, reparere eller ændre gyngestolen. Dette kræver fagspecialiseret personale. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre brand eller tilskadekomst som følge af funktionsfejl.
8. Opbevar fjernbetjeningen utilgængeligt for børn. Børn kan fjerne batterierne og sluge dem ved et uheld.
9. Undlad at sætte batterierne med plus- og minuspolerne vendt forkert. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre brand.

**FØR BRUG****⚠ PAS PÅ****Følg disse forholdsregler**

1. 1. Personer med en af tilstandene på listen nedenfor bør konsultere deres læge, inden de anvender gyngestolen, selvom de aktuelt befinder sig godt:
 - a) Personer, som har tendens til at blive bevægelsessyge.
 - b) Personer, som lider af rygsmerter forårsaget af knoglerne eller indre organer.
 Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre sundhedsskade.
2. Brug ikke gyngestolen, mens du bærer noget hårdt på dit hoved som fx et hårspænde osv. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre tilskadekomst.
3. Sluk altid gyngestolen, inden du rejser dig fra den. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskadekomst.
4. Tag fat i strømstikket (ikke strømledningen), når du afbryder strømstikket fra stikkontakten. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller kortslutning.
5. Når du flytter gyngestolen på hjulene, skal du fjerne alle hindringer omkring den, sikre, at ryglænet er i lodret stilling, føre fodstøtten op til maksimalt taljehøjde og langsomt rulle stolen. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan gyngestolen tippe, hvilket kan medføre produktbeskadigelse eller tilskadekomst.
6. Anbring gyngestolen på en helt plan overflade. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre, at gyngestolen tipper.
7. Afbryd straks strømstikket, og kontakt et autoriseret servicecenter for at arrangere reparation, hvis gyngestolen holder op med at fungere eller ikke fungerer korrekt. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
8. Hvis du får kvalme af at bruge gyngestolen, så stop brugen, og konsultér din læge.

Sikkerhedsregler

1. Brug ikke gyngestolen, efter du har drukket alkohol. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskadekomst.
2. Undlad at stikke hænderne eller fødderne ind i følgende åbninger på gyngestolen:
 - a) Åbningen mellem ryglænet og sædet
 - b) Åbningen mellem fodstøtten og sædet
 - c) Afdækningen mellem soklen og sædet
 Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre tilskadekomst.
3. Undlad at flytte gyngestolen, når der sidder nogen i den. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskadekomst som følge af, at gyngestolen tipper.
4. Brug ikke gyngestolen i badeværelser eller på andre fugtige steder. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller funktionsfejl.
5. Undgå at spilde vand eller andre væsker på gyngestolen eller fjernbetjeningen. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, kortslutning eller funktionsfejl.
6. Afbryd altid gyngestolens stik fra stikkontakten inden rengøring. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller forbrændinger.
7. Afbryd straks gyngestolens stik i tilfælde af strømsvigt. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskadekomst, når strømmen kommer igen.
8. Afbryd altid gyngestolens stik fra stikkontakten efter brug. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre brand som følge af forringelse af isoleringen forårsaget af støv og fugt.

FØR BRUG**VEJLEDNING OM JORDFORBINDELSE**

Dette produkt skal jordforbindes. Hvis der opstår funktionsfejl eller produktet bryder sammen, giver jordforbindelsen mindre modstand for elektriciteten og reducerer derved risikoen for elektrisk stød. Dette produkt er udstyret med en ledning, der har en apparatjordleder og et trebenet stik. Stikket skal sættes ind i en passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i henhold til alle lokale bestemmelser.

FARE

Forkert tilslutning af stikkontakten kan forårsage risiko for elektrisk stød. Konsultér en kvalificeret elektriker eller serviceperson, hvis du er i tvivl, om produktet er ordentligt jordforbundet. Du må ikke modificere det stik, der følger med produktet - hvis det ikke passer ind i en stikkontakt, skal du få en korrekt stikkontakt installeret af en kvalificeret elektriker. Denne gyngestol har et jordstik. Sørg for, at produktet er sluttet til en stikkontakt med samme udformning som stikket. Brug ikke en adapter sammen med denne gyngestol.

► Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)

Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.

For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger.

I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.

Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med til at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet.

Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.

I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.

► Professionelle brugere i EU

Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.

► Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU

Dette symbol er kun gyldigt i EU.

Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.

**FØR BRUG****SPECIFIKATIONER****System**

Strømforsyning	Vekselstrøm 230 V/50 Hz
Strømforbrug	90 W
Strømforbrug i standbytilstand 0 W	0 W
Timer	Afslapningsprogram: Ca. 20 minutter (Relax)
	Opkvikningsprogram: Ca. 20 minutter (Refresh)
	Komfortprogram: Ca. 120 minutter (Comfort)
Driftsomgivelser (temperatur)	0 til 40 °C

Hovedenhed (stol)

Mål (H x B x D)	Ca. 110 cm x 70 cm x 102 cm / med vogn og armlæn ca. 110 cm x 85 cm x 102 cm. Frihøjde under vogn: 13 cm.
Gyngestolens vægt	Ca. 46 kg (inklusive hynde, pude og fjernbetjening, ekskl. vogn)
Beklædning	PVC-læder (syntetisk læder)
Polstringsmateriale	Uretan

Forstærker

Vibrationsforstærker (maksimal effekt)	14 W 8 Ω 70 Hz Total harmonisk forvrængning: 10 %
Højtalerforstærker (maksimal effekt)	14 W (7 W + 7 W) 8 Ω 1 kHz Total harmonisk forvrængning: 10 %

Højtaler

Type	1-vejs, 1-højtalersystem
Impedans	8 Ω
Membranstørrelse	Komplet: 7 cm x 2
Skærmet design	Nej

Vibration

Impedans	8 Ω
Ekstern inputterminal	Stereo mini-jack (diameter: 3,5 mm)

BEMÆRK

Anbefalet maks. brugervægt: 130 kg

• Ved anvendelse af en person, der vejer mere end den maksimalt anbefalede brugervægt, vil støjniveauet muligvis være højere.

FØR BRUG**PRODUKTINTRODUKTION****Funktioner****► Komfortabel vuggefunktion**

Det føles, som om man ligger i en vugge. Den komfortable vuggefunktion, basvibrationen og Musicure®-musikken, som gyngestolen er udstyret med, får mennesker til at slappe af både fysisk og mentalt.

► Basvibration genereret ud fra musikken




Gyngestolen frembringer basvibration, som genereres ud fra basfrekvensen i musikken, så man kan slappe af.

Musicure®-musikken i gyngestolen er specielt komponeret til programmerne. Musicure®-musikken er forinstalleret i gyngestolen. Man kan også tilslutte en ekstern musikkilde til gyngestolen og lytte til sin yndlingsmusik.


Præsentation af programmerne

Denne gyngestol har tre forindstillede programmer.

Programmer	Anbefales til:
<p>"Relax" Afslapningsprogram (Se side DA15)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dem, som trænger til ro, som f.eks. demente, autister eller andre med udadreagerende og urolig adfærd • Dem, som har problemer med at slappe af eller svært ved at falde i søvn
<p>"Refresh" Opkvikningsprogram (Se side DA15)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dem, som trænger til opkvikning, evt. før et måltid, som f.eks. demente eller mennesker med døgnrytmeforstyrrelse,
<p>"Comfort" Komfortprogram (Se side DA16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dem, som har behov for en længere periode med ro og afslapning.

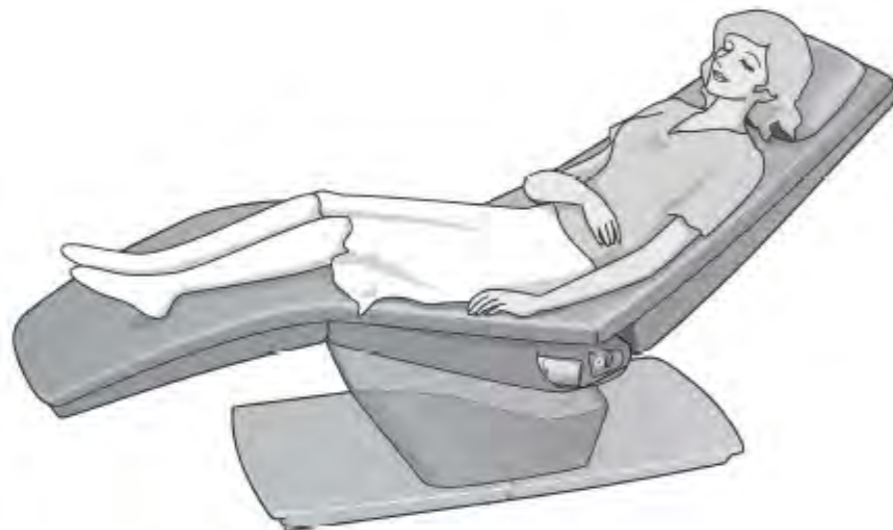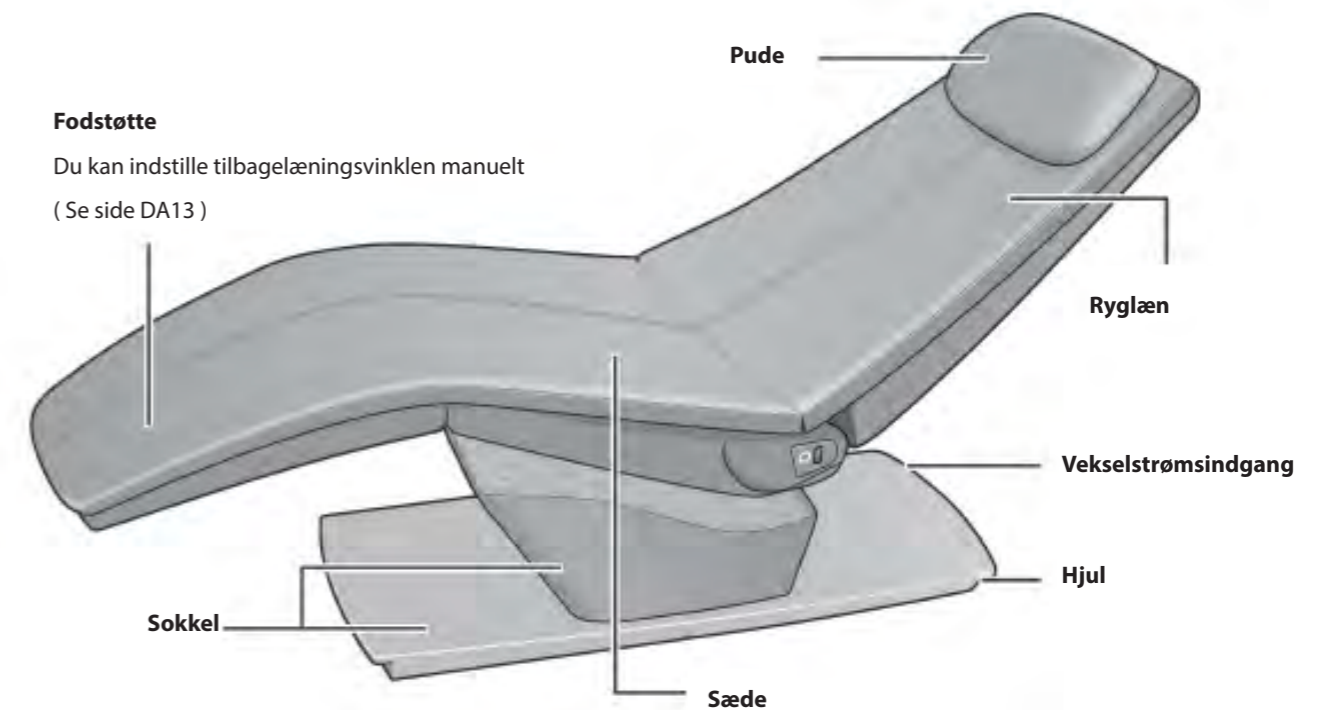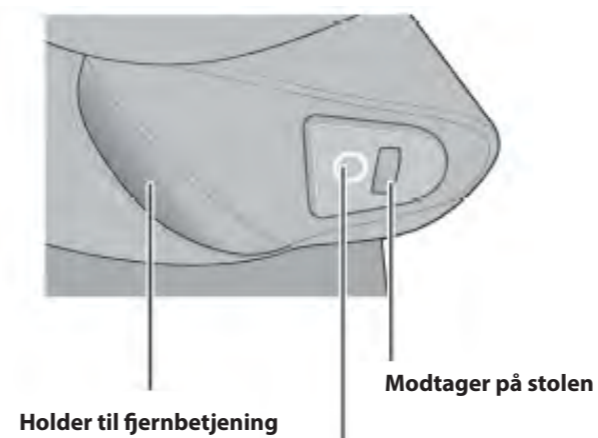**FØR BRUG****DELENES BETEGNELSER OG FUNKTIONER****Hovedenhed****Venstre side****Betjeningsknap til stol**

Du kan starte gyngestolen ved at trykke på denne knap på stolen.
(Se side DA18)

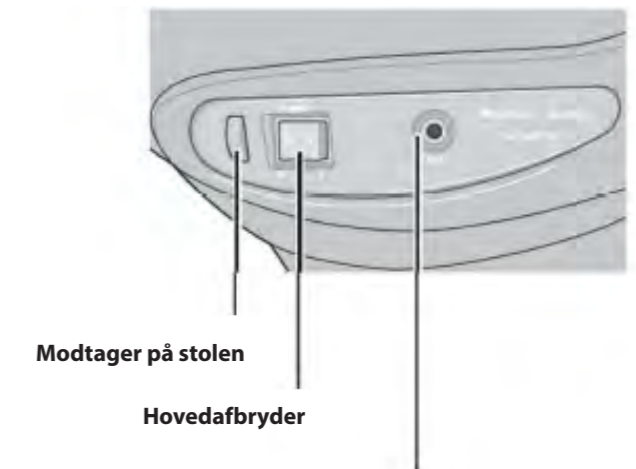Højre side


Du kan tilslutte en ekstern musikkilde til gyngestolen.

Leveringsomfanget omfatter ikke en ledning til dette formål.
(Se side DA18)


FØR BRUG

Fjernbetjening

For

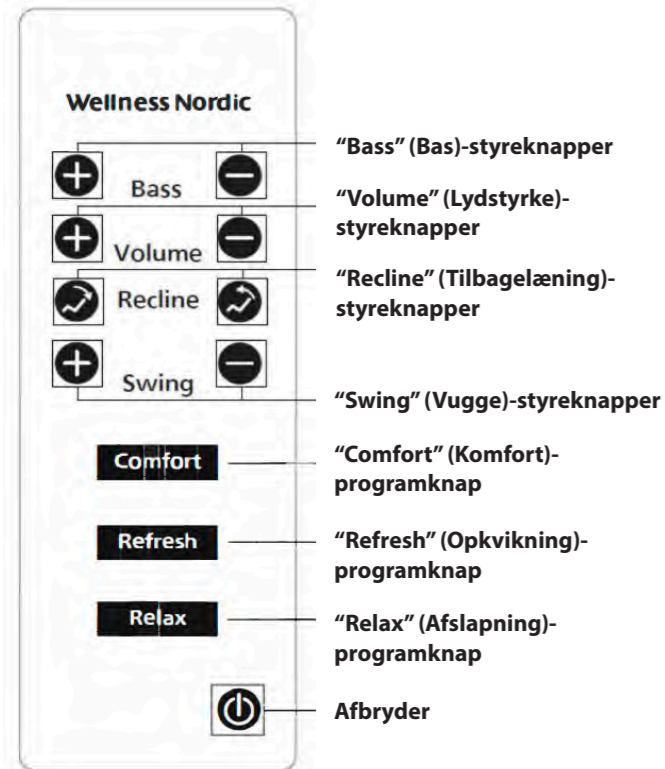

Bag

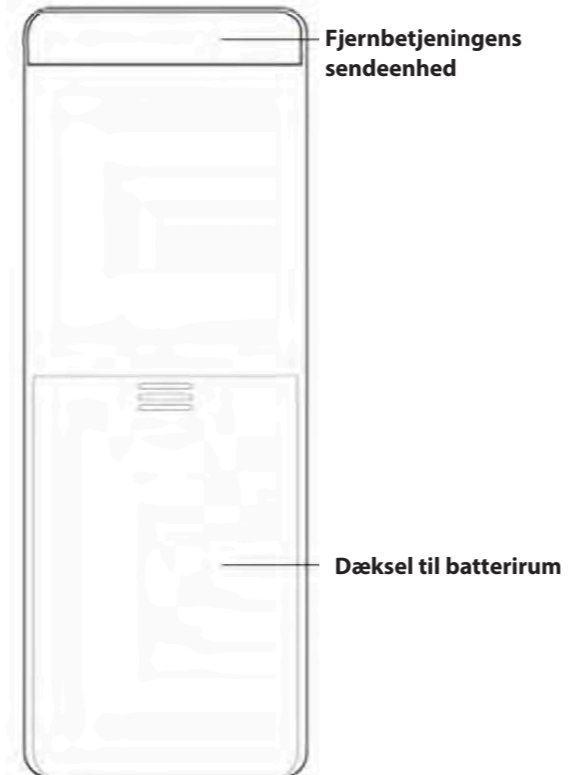


Fjernbetjeningens sendeenhed og modtagere på gyngestolen

- Driftsområdet er ca. 1 m.
- Ret sendeenheden på fjernbetjeningen mod en modtager på gyngestolen.
- Signalerne fra fjernbetjeningen kan ikke nå frem til gyngestolen, hvis afstanden er over 1 m.
- Når gyngestolen modtager en kommando fra fjernbetjeningen, bør der lyde et bip.

BEMÆRK

- Hvis der er opstillet to eller flere gyngestole i samme område, skal der være en vis afstand (ca. 2 m) eller en afskærmning mellem dem for at forhindre interferens.
- Hvis der er genstande mellem fjernbetjeningen og modtageren, kan det hindre signaloverførslen.
- Hvis modtageren er udsat for direkte sollys eller stærkt lys fra en inverterdrevet fluorescerende lampe, kan det hindre signaloverførslen.

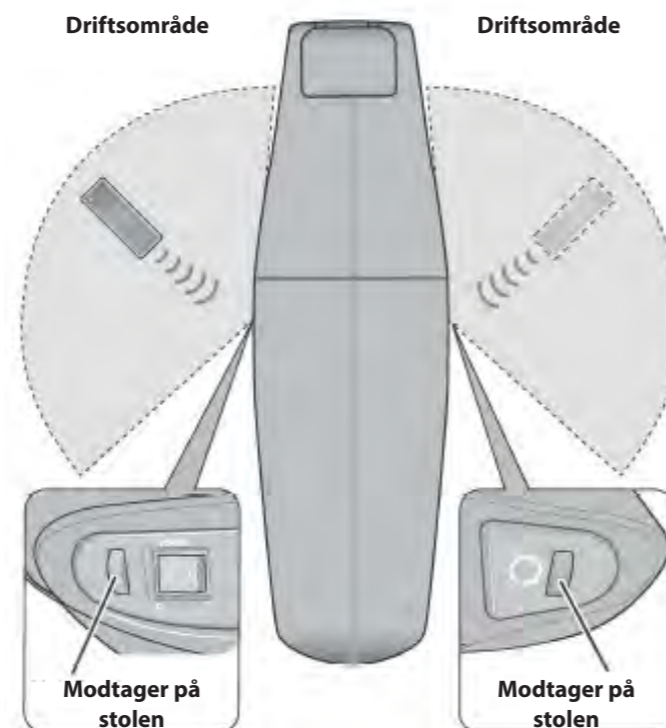

DA8


FØR BRUG

OPSTILLING AF GYNGESTOLEN

Beslut, hvor gyngestolen skal stå, inden du pakker den ud.

Anvendelsesområde for gyngestolen

- Lad ikke gyngestolen blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer, som for eksempel foran et varmeapparat, da dette kan medføre, at overfladematerialet bliver misfarvet eller hårdt.
- Anbring gyngestolen i nærheden af stikkontakten.
- Placer gyngestolen således, at bagsiden ikke kommer i kontakt med andre genstande (en sådan kontakt kan medføre, at gyngestolen bliver misformet og beskadiget).
- Justér placeringen af gyngestolen, så den passer til brugernes højde.

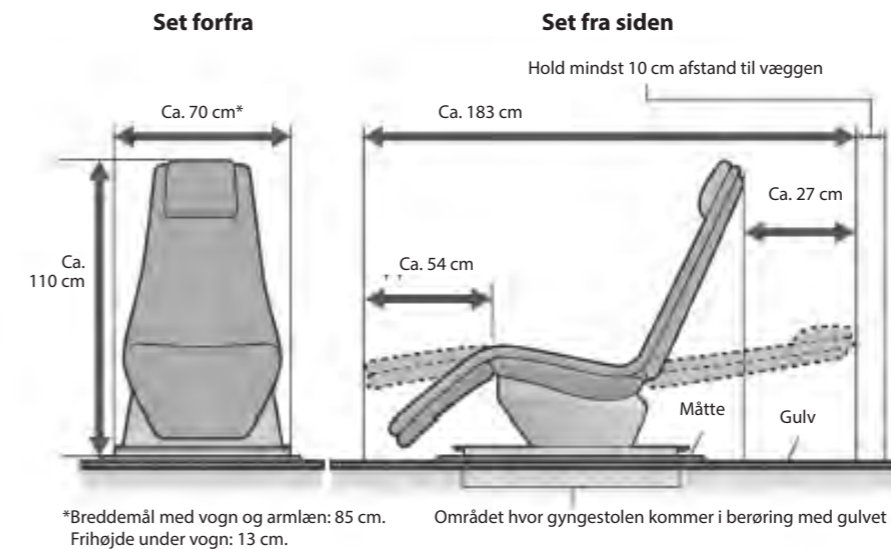


⚠ PAS PÅ

- Brug ikke gyngestolen i badeværelser eller på andre fugtige steder. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller funktionsfejl.
- Anbring gyngestolen på en helt plan overflade. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre, at gyngestolen tipper.

Sådan opstilles gyngestolen

1 Pak gyngestolen ud


Hynden fastgøres til stolen, inden stolen afsendes fra fabrikken.

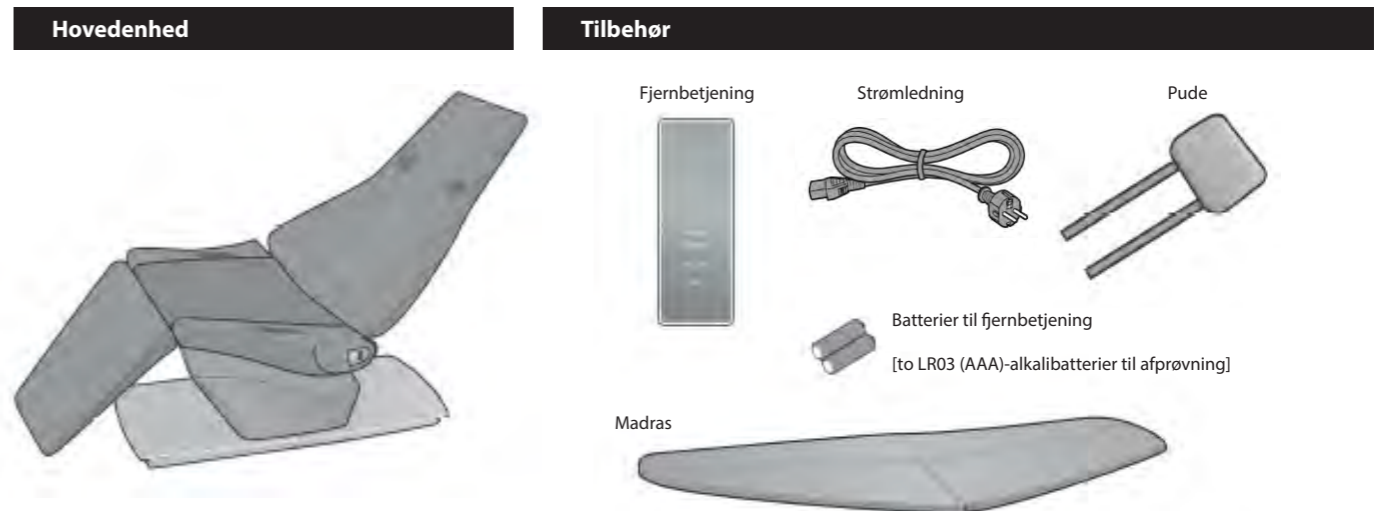



DA9

FØR BRUG**2 Fastgør puden, og justér dens position**

Madrassen position kan justeres op eller ned ved hjælp af bælteerne på puden.

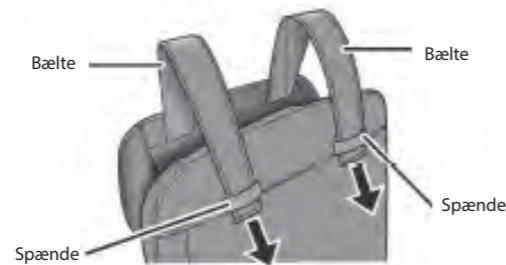
**Sådan fastgøres madrassen på gyngestolen**

- Ret velkrobandet på bagsiden af hynden ind efter velkrobandet på gyngestolen.
- Der er velkroband både på gyngestolen og hynden.
- Fastgør hynden således, at den er rettet ind efter siden af gyngestolen.
- Hvis en modtager er tildækket, kan det hindre signaloverførslen.

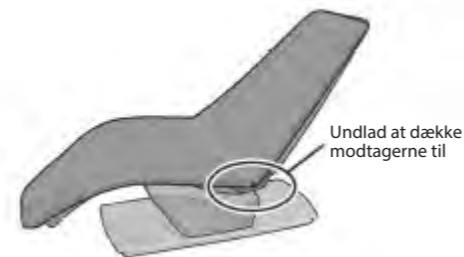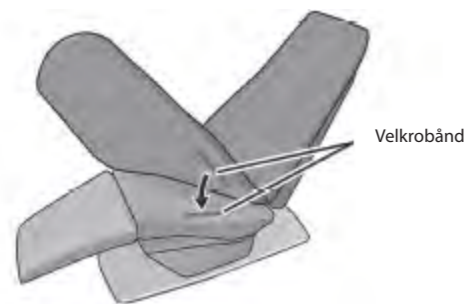
**ANVISNINGER FOR BRUG****FORBEREDELSE****Fjernbetjening**

Sæt batterier i fjernbetjeningen.


- 1 Åbn dækslet til batterirummet ved at skubbe det i den retning, som angives af pilen**

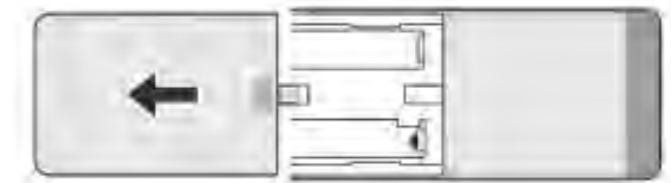

- 2 Sæt to batterier i fjernbetjeningen**
Sørg for at vende dem rigtigt (+ og -), og isæt batteriets minuspol først.

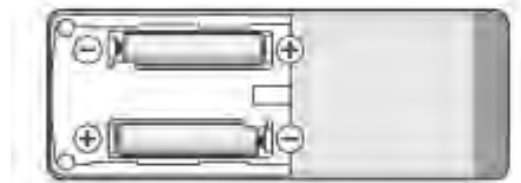

- 3 Luk dækslet til batterirummet ved at skubbe det i den retning, som angives af pilen.**

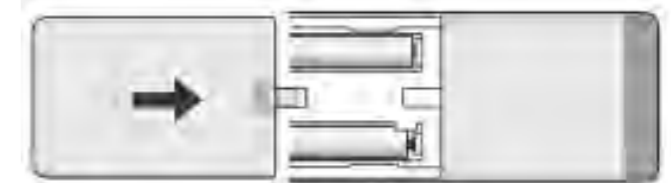**OBS vedrørende batterier**

- Hvis gyngestolen bruges en gang om dagen, kan batterierne ca. holde et halvt år. (Hvis det bliver vanskeligt at styre gyngestolen med fjernbetjeningen, eller hvis lyset i fjernbetjeningen bliver svagt, skal du skifte batterier.)
- Da de batterier, som følger med denne gyngestol, kun er beregnet til afprøvning af fjernbetjeningen, kan de muligvis ikke holde et halvt år.
- Når du skifter batterier, skal du isætte to nye LR03 (AAA)-alkalibatterier på samme tid. (Hvis du bruger manganbatterier, vil de ikke holde ret længe.)
- Undlad at anvende genopladelige batterier såsom NiCd- eller nikkelmetalhydridbatterier, da de kan afvige mht. mål, form og ydelse.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge gyngestolen i længere tid, for at undgå lækage.

Gyngestol (før hver anvendelse)

Kontrollér følgende punkter, før du anvender gyngestolen.

- 1 Kontrollér, at der ikke er revner eller rifter i stoffet på soklen.**

⚠ ADVARSEL

Kontroller altid, at der ikke er revner i stoffet på soklen, inden du bruger gyngestolen. Kontroller også andre områder for at sikre, at der ikke er revner i stoffet.

Hvis du finder en revne, skal du - uanset hvor lille revnen er - straks indstille brugen af gyngestolen, trække strømledningen ud og få gyngestolen repareret hos et autoriseret servicecenter. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre tilskadekomst eller elektrisk stød.




ANVISNINGER FOR BRUG

2 Kontrollér strømledningen og strømstikket


⚠ ADVARSEL

- Fjern støv fra strømstikket med jævne mellemrum. Fjern støv med en tør klud.
- Undgå at beskadige strømledningen eller strømstikket. (Undlad at gøre følgende med ledningen: beskadige den, ændre den, udsætte den for varmekilder, bøje den, sno den, trække hårdt i den, bundte den sammen eller placere tunge genstande oven på den.) Hvis du anvender en strømledning eller et strømstik, som er beskadiget, kan det medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand. Kontakt dit nærmeste autoriserede servicecenter for at få foretaget reparation.

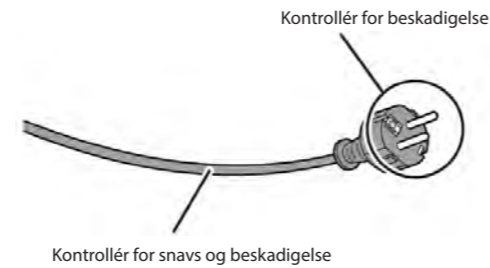

3 Tilslut strømledningen til vekselstrømsindgangen på gyngestolen


Sørg for at sætte strømledningen helt ind i indgangen.

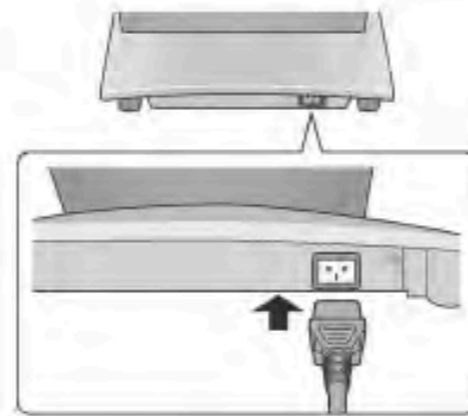

4 Sæt strømstikket i en stikkontakt

⚠ ADVARSEL


- Sæt altid strømstikket helt ind i stikkontakten. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand som følge af varmegenerering.
- Undlad at overskride mærkeværdierne for stikket og ledningen eller at anvende en anden spænding end mærkespændingen. (Gyngestolen må ikke anvendes med en transformer.) Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, funktionsfejl eller brand som følge af varmegenerering.
- Undlad at tilslutte/afbryde strømstikket med våde hænder. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød.

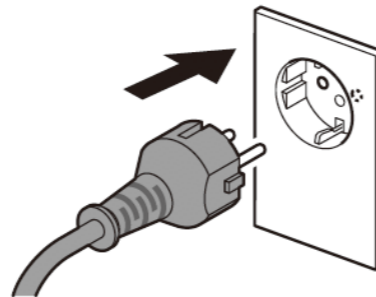

5 Sæt hovedafbryderen i "I" (TIL)-stillingen

BEMÆRK

Strømmen afbrydes automatisk, hvis der ikke udføres nogen funktioner i 120 minutter, efter at strømmen er blevet slået til.

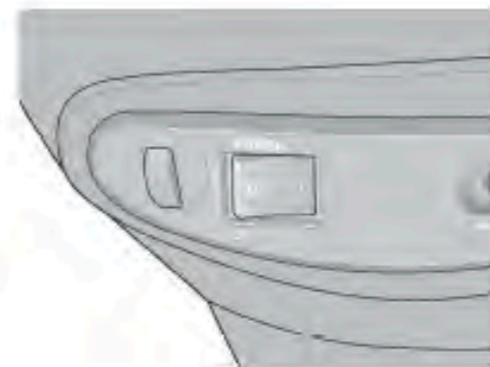


ANVISNINGER FOR BRUG

1 Justér vinklen på fodstøtten.

Du kan justere vinklen på fodstøtten, som du vil. Når du løfter fodstøtten som vist i diagrammet til højre, vil du høre et klik, og fodstøtten standser i stillingen mellem "A" og "B". Hvis fodstøtten løftes højere end til vandret niveau, vender den tilbage til den oprindelige "A"-stilling.

Når dette udføres, så vær forsigtig med ikke at fjerne hænderne hurtigt fra fodstøtten.

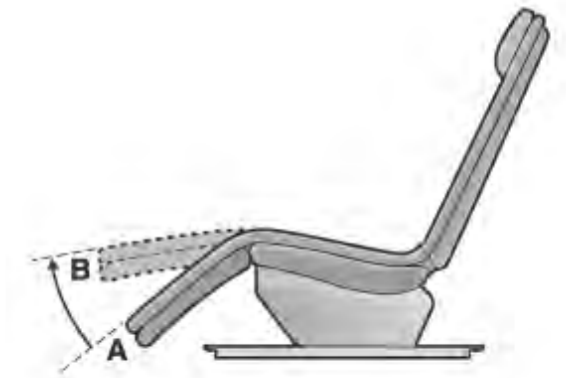

2 Sæt dig på gyngestolen

Sæt dig, så din ryg kommer i kontakt med hynden på gyngestolen. Hvis der er et mellemrum mellem din ryg og hynden, sker der muligvis kun en svag overførsel af vibrationer.




3 Tryk på en af knapperne på fjernbetjeningen for at tænde lyset

Lyset tænder, når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen.

4 Tryk på knappen for det ønskede program

Det valgte program starter og kører, indtil det er slut, hvorefter stolen automatisk stopper.

Du kan justere indholdet af det valgte program i henhold til dine ønsker. (Se side DA17)

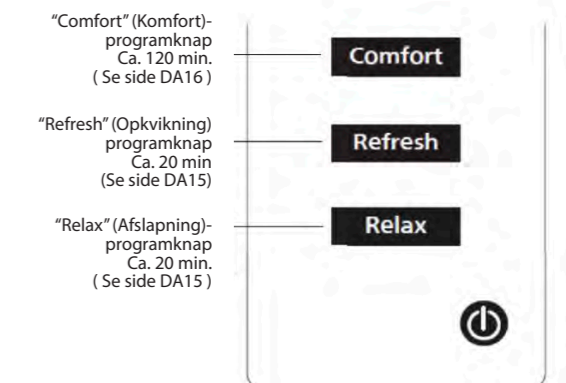

ANVISNINGER FOR BRUG

5 Sæt hovedafbryderen i "O" (FRA)-stillingen

BEMÆRK

Strømmen afbrydes automatisk 120 minutter, efter at funktionen er indstillet, selv hvis du ikke sætter hovedafbryderen i "O" (FRA)-stillingen.



6 Afbryd strømstikket fra stikkontakten


Afbrydelse af et program

1 Tryk på afbryderen

Driften indstilles, og ryglænet føres retur fra tilbagelænet stilling til udgangsstillingen.

PAS PÅ


- Stands altid gyngestolen, inden du rejser dig fra den. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskadekomst.

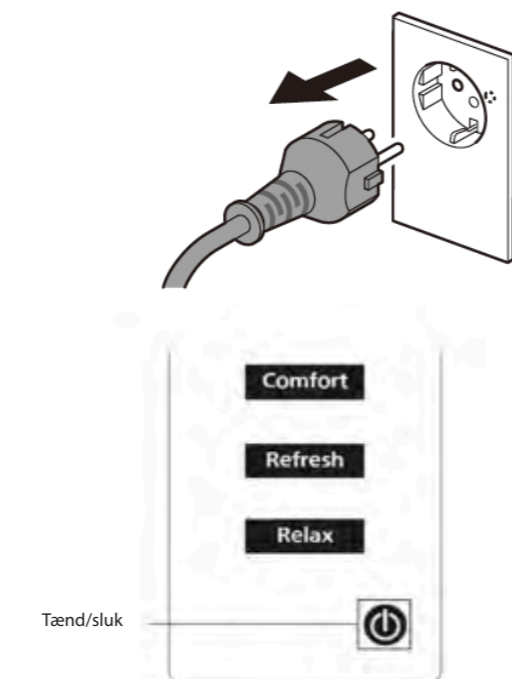


2 Sæt hovedafbryderen i "O" (FRA)-stillingen

BEMÆRK

Strømmen afbrydes automatisk 120 minutter, efter at funktionen er indstillet, selv hvis du ikke sætter hovedafbryderen i "O" (FRA)-stillingen.

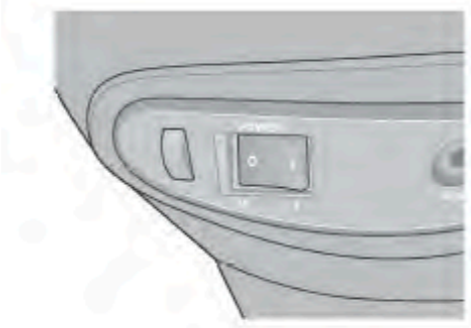

3 Afbryd strømstikket fra stikkontakten

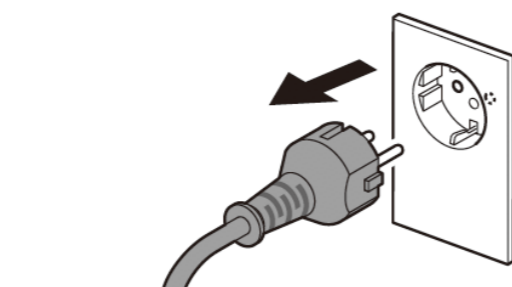

ANVISNINGER FOR BRUG

PROGRAMINDHOLD

De følgende tre programmer er forindstillet i gyngestolen.

Relax – afslapningsprogram (ca. 20 minutter)

Brug dette program, når du vil ligge ned og slappe af.

Gyngeshastighed	Start 4 min. Slut
	Hurtig Langsom
Lydstyrke for forinstalleret musik	Start 3 min. Slut
	Normal Aftagende
Tempo for forinstalleret musik	Normal Langsom
	(Dette er billeder af lydstyrken og tempoet for den forinstallerede musik. Lydstyrken og tempoet varierer afhængigt af musikken.)
Tilbagelænet stilling	Start Slut
	Samme stilling

BEMÆRK

- Dette program har to forinstallerede stykker musik, som afspilles i rækkefølge.
- Du kan ikke indstille afspilningsrækkefølgen for den forinstallerede musik.
- Hvis du vil ændre musikken, skal du trykke en gang på afbryderen på fjernbetjeningen for at stoppe driften og derefter vælge programmet igen.

Refresh – opvikningsprogram (ca. 20 minutter)

Brug dette program, når du vil lette spændinger i løbet af et begrænset tidsrum.

Gyngeshastighed	Start 4 min. Slut
	Hurtig Langsom Hurtig
Lydstyrke for forinstalleret musik	Start 6 min. 8 min. Slut
	Normal Aftagende Øges
Tempo for forinstalleret musik	Hurtig Normal Langsom Hurtig
	(Dette er billeder af lydstyrken og tempoet for den forinstallerede musik. Lydstyrken og tempoet varierer afhængigt af musikken.)
Tilbagelænet stilling	Start Slut
	Sænkes gradvist Hæves gradvist

BEMÆRK

- Dette program har to forinstallerede stykker musik, som afspilles i rækkefølge.
- Du kan ikke indstille afspilningsrækkefølgen for den forinstallerede musik.
- Hvis du vil ændre musikken, skal du trykke en gang på afbryderen på fjernbetjeningen for at stoppe driften og derefter vælge programmet igen.

ANVISNINGER FOR BRUG

Comfort – komfortprogram (ca. 120 minutter)

Brug dette program, når du vil slappe af, mens du fx læser eller ser fjernsyn.

Gyngeshastighed	Start ▼ Komfortabel →	Slut
Tilbagelænet stilling	Start ▼ Samme stilling →	Slut

BEMÆRK

- Der findes ingen forinstalleret musik i komfortprogrammet.

ANVISNINGER FOR BRUG

SÅDAN JUSTERES INDHOLDET AF ET PROGRAM IHT. DINE ØNSKER

Du kan tilpasse indholdet af det valgte program under drift.

Sådan justeres gyngeshastigheden

- Tryk på knapperne "Swing" (Gynge).
Gyngefunktionen kan indstilles til tre forskellige hastigheder.

Sådan justeres tilbagelæningsvinklen på ryglænet

- Tryk på knapperne "Recline" (Tilbagelæning), og hold dem inde.
- Du kan justere tilbagelæningsvinklen til den stilling, du foretrækker.
- Når ryglænet er kørt helt op eller ned, lyder der et bip fra gyngestolen som bekræftelse.

Sådan justeres lydstyrken på musikken


- Tryk på knapperne "Volume" (Lydstyrke).
- Lydstyrken kan indstilles til seks forskellige niveauer (inklusive slået fra).

Sådan justeres basvibrationens intensitet

- Gyngestolen vibrerer i henhold til basfrekvensen i musikken.
- Tryk på "Bass" (Bas)-styreknappe.
- Bassen kan indstilles til seks forskellige niveauer (inklusive slået fra).

BEMÆRK

- Når du slukker på hovedafbryderen, nulstilles dine personlige indstillinger.
- Hvis du ændrer programmet under drift, nulstilles tilbagelæningsvinklen.

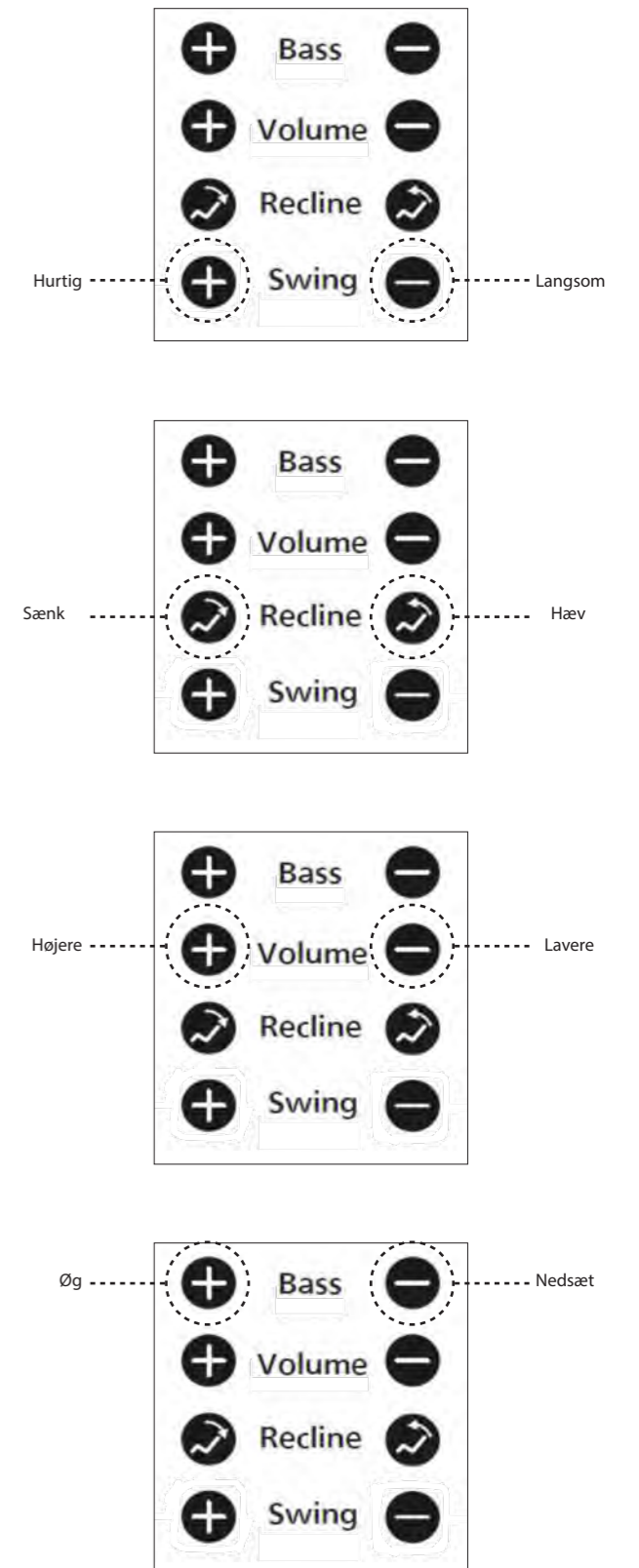


ANVISNINGER FOR BRUG

BETJENING AF GYNGESTOLEN UDEN BRUG AF FJERNBETJENINGEN

Du kan betjene gyngestolen ved hjælp af betjeningsknappen på gyngestolen, hvis fjernbetjeningen bliver væk, eller hvis batterierne i fjernbetjeningen er afladede.

1 Tryk på betjeningsknappen på gyngestolen

Når du trykker på betjeningsknappen på gyngestolen, ændres programindstillingen i følgende rækkefølge:

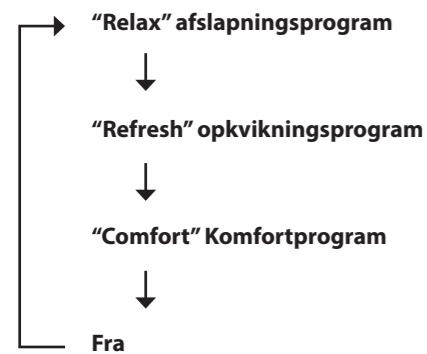

TILSLUTNING AF EKSTERNT Udstyr FOR AT LYTTE TIL MUSIK


Du kan slutte en eksternt musikkilde, f.eks. en cd-afspiller eller digital lydafspiller, til gyngestolen. På den måde kan du lytte til din yndlingsmusik og nyde den basvibration, som genereres ud fra denne musik.

1 Tilslut stikket fra den eksterne musikkilde til "AUX"-terminalen på gyngestolen

- Når du tilslutter stikket, anvender gyngestolen automatisk lyden fra den eksterne musikkilde. Hvis du vil gå tilbage til den forinstallerede musik, skal du trykke på afbryderen på fjernbetjeningen for at stoppe driften. Vælg derefter programmet igen.
- Inden du tilslutter stikket, skal du skrue ned for lyden på den eksterne musikkilde. Når du har tilsluttet stikket, skal du justere lydstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af betjeningsknapperne på den eksterne musikkilde og/eller ved hjælp af fjernbetjeningen.

BEMÆRK

- "AUX"-terminalen på gyngestolen er kompatibel med et stereo mini-jack (diameter: 3,5 mm).
- Leveringsomfanget omfatter ikke en ledning til dette formål. Køb en ledning, som er kompatibel med den eksterne musikkilde.
- Vi kan ikke garantere lyd kvaliteten, da højttaleren er placeret under hynden på gyngestolen. Bemærk, at lyd kvaliteten afviger fra lyd kvaliteten på en sædvanlig lydenhed.

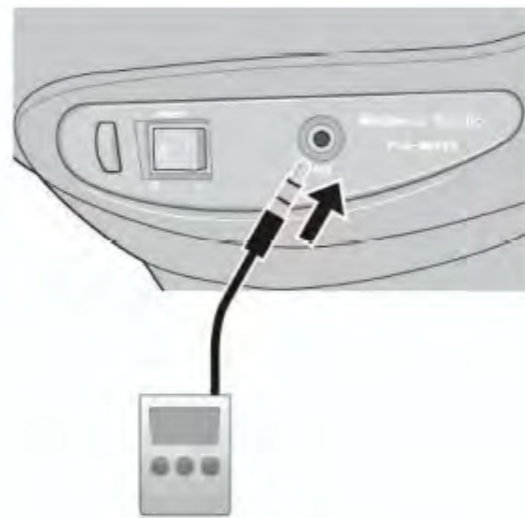

ANVISNINGER FOR BRUG

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ PAS PÅ

Afbryd altid gyngestolens stik fra stikkontakten inden rengøring. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller forbrændinger.

Områder af syntetisk læder

1 Tør disse områder af med en blød, tør klud

BEMÆRK

- Når du bruger almindelige plejeprodukter til kunstlæder (klude med enhver form for kemikalier), skal forholdsreglerne for dette produkt overholdes. Hvis det syntetiske læder er særligt beskidt, skal det aftørres på følgende måde.
 - Læg en blød klud i blød i vand eller en 3 til 5 % opløsning af mildt rengøringsmiddel, og vrid den grundigt.
 - Dup overfladen med den fugtige klud.
 - Skyl kluden i vand, vrid den grundigt, og tør derefter eventuelt resterende rengøringsmiddel af overfladen.
 - Tør området af med en blød, tør klud.
 - Lad det tørre naturligt. Hvis snavset ikke fjernes i tilfredsstillende grad, så tør overfladerne af med en standard-melaminskumsvamp, som er fugtet med en mild rengøringsopløsning.
- Brug ikke en hårtørret for at tørre overfladen hurtigere.
- Da farver fra tøj kan smitte af på den syntetiske læderoverflade, skal du være forsigtig, hvis du bruger gyngestolen, når du har cowboybukser eller farvet tøj på.
- Lad ikke disse områder komme i kontakt med plast i længere tid ad gangen, da dette kan medføre misfarvning.
- Brug ikke fortyndere, benzin eller alkohol.

Plastområder

1 Tør disse områder af med en klud, som er fugtet med et mildt rengøringsmiddel og vredet grundigt

Brug ikke fortyndere, benzin eller alkohol.

2 Tør disse områder af med en klud, som er fugtet med vand og vredet grundigt

Sørg for at vride kluden, inden du tørrer fjernbetjeningen af.

3 Lad områderne tørre naturligt

Sædestof

1 Tør sædestoffet af med en klud, som er fugtet med et mildt rengøringsmiddel og vredet grundigt

Brug ikke fortyndere, benzin eller alkohol.

2 Brug vand eller et mildt rengøringsmiddel, og børst de steder, hvor sædestoffet er særligt snavset

Pas på ikke at børste for meget for at undgå at beskadige stoffet.

3 Tør stoffet med en klud, som er fugtet med vand og vredet grundigt

4 Lad stoffet tørre naturligt

ANVISNINGER FOR BRUG

FEJLFINDING

Problem	Årsag og afhjælpning
Gyngestolen fungerer overhovedet ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Strømledningen er afbrudt fra vekselstrømsindgangen. (Se side DA12) • Strømtikket er afbrudt. (Se side DA12) • Hovedafbryderen på gyngestolen er sat i "O" (FRA)-stillingen. (Se side DA12) • Der er ikke valgt et program på fjernbetjeningen. • Driftssignalet fra fjernbetjeningen overføres ikke til gyngestolen. » Kontrollér fjernbetjeningens sendeenhed og driftsområde, inden den anvendes. (Se side DA8) (Når driftssignalet sendes til enheden, lyder der et bip fra gyngestolen som bekræftelse.)
Der høres intet lydsignal. Der frembringes ingen vibrationer.	<ul style="list-style-type: none"> • Lydstyrken eller vibrationsstyrken er indstillet til laveste niveau. (Se side DA17) • Den tilsluttede musikkilde afspilles ikke. (Se side DA18) • Lydstyrken på den tilsluttede musikkilde er indstillet til laveste niveau. (Se side DA18) • Musikkilden afbrydes under drift. Når du tilslutter en ekstern musikkilde til gyngestolen, afspilles musikken fra den eksterne musikkilde. Hvis du vil lytte til den forinstallerede musik igen, skal du afbryde strømmen en gang ved hjælp af fjernbetjeningen. (Når strømmen afbrydes, nulstilles musikkilden til den indbyggede lydkilde.)
Der høres støj.	<ul style="list-style-type: none"> • Gyngestolen påvirkes af stærkt magnetiseret udstyr som for eksempel fjernsyn. » Sluk for fjernsyn og lignende udstyr, eller ryk dem væk fra gyngestolen.
Gyngestolen reagerer ikke på fjernbetjeningen.	<ul style="list-style-type: none"> • Driftssignalet fra fjernbetjeningen overføres ikke til gyngestolen. » Kontrollér fjernbetjeningens sendeenhed og driftsområde, inden den anvendes. (Se side DA8) (Når driftssignalet sendes til enheden, lyder der et bip fra gyngestolen som bekræftelse.) • Batterierne er muligvis afladede.
Lydkvaliteten er dårlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette produkt er designet til at anvende vugning, vibration og lyd til afslapningsformål. Lydkvaliteten i gyngestolen er dårligere end i en sædvanlig lydenhed, da lyden kun er en sekundær støttefunktion.
Gyngestolen er gået i stykker.	<ul style="list-style-type: none"> • Stop øjeblikkelig brugen af gyngestolen.
Strømledningen eller strømtikket er unormalt varmt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stop øjeblikkelig brugen af gyngestolen.